

Wellell



Explorer Noa & Noa Compact (9001 9001S)

Raúl González

09.03.2026

• V. 04.02.2026

BOM

Wellell

EXPLORER NOA

ÍNDICE

CHASIS INFERIOR NOA	PÁGINA 1
CHASIS INFERIOR NOA COMPACT	PÁGINA 2
CHASIS PRINCIPAL NOA	PÁGINA 3
CHASIS PRINCIPAL NOA COMPACT	PÁGINA 4
CHASIS RESPALDO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 5
TAPIZADO RESPALDO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 6
COJÍN RESPALDO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 7
CHASIS ASIENTO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 8
BASE COJÍN ASIENTO NOA / COMPACT	PÁGINA 9
COJÍN ASIENTO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 10
PLATAFORMA REPOSAPIÉS NOA / COMPACT	PÁGINA 11
FIJACIONES PLATAFORMA NOA / COMPACT	PÁGINA 12
TUBO SUPERIOR RESPALDO NOA / COMPACT	PÁGINA 13
HORQUILLA NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 14
MOTOR IZQUIERDO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 15
MOTOR DERECHO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 16
REPOSABRAZOS IZQUIERDO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 17
REPOSABRAZOS DERECHO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 18
ANTI VUELCO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 19
CARGADOR NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 20
BATERÍA NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 21
CENTRALITA NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 22
CABLE JOYSTICK NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 23
SOPORTE JOYSTICK NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 24
JOYSTICK NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 25
PILOTO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 26
RUEDAS MALETERO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 27
CABLE ALIMENTACIÓN NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 28
PALANCA LIBERACIÓN NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 29
GATILLO BLOQUEO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 30
CESTA NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 31
TAPA DESBLOQUEO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 32
RUEDA DELANTERA NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 33
RUEDA TRASERA NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 34
TAPAS & TAPONES NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 35
ARTICULACIÓN REPOSABRAZOS NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 36
RUEDA ANTIVUELCO NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 37
GUARDABARROS NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 38
ESPUMA REPOSABRAZOS IZQ. NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 39
ESPUMA REPOSABRAZOS DRCH. NOA / NOA COMPACT	PÁGINA 40

CHASIS INFERIOR NOA

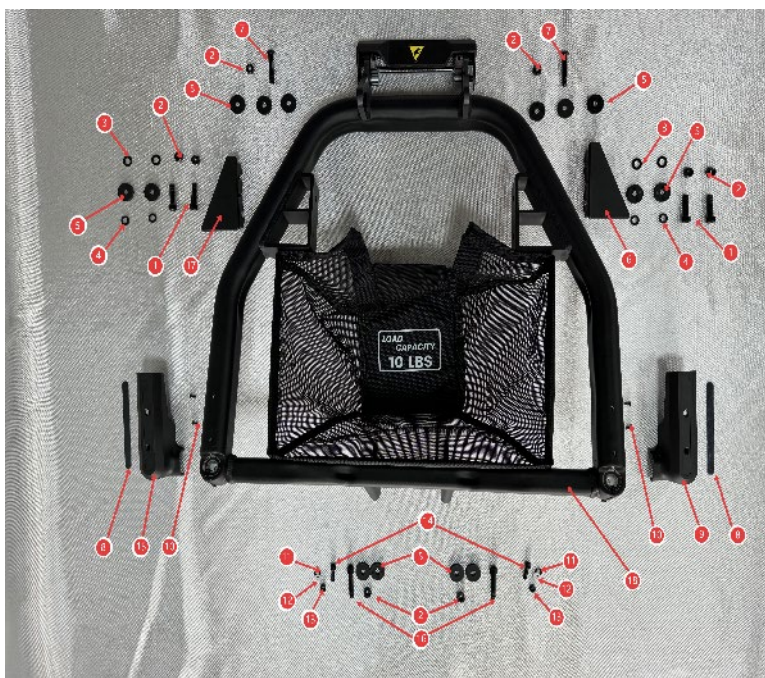


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M8*30 GB/T70.1	B-A001-00011	04062564	4
2	Tuerca M8 GB889			8
3	Arandela plana 8 GB97			4
4	Arandela Nylon $\phi 13.5 \times 8 \times 0.8$			8
5	Arandela Nylon 25T5			14
6	Funda de reposabrazos izquierda			1
7	Tornillo M8*40 10 GB/T70.2			2
8	Parche de cubierta de la articulación del antebrazo			2
9	Cubierta de la articulación del antebrazo izquierda			1
10	Tornillo M4*10 GB/T70.3			4
11	Arandela 6 GB93			2
12	Arandela Nylon blanca $\phi 13 \times 6.9 \times 1.1$			2
13	Tuerca M6 GB889			2
14	Tornillo M6*20 GB/T 70.1			2
15	Cubierta de la articulación del antebrazo Derecha			1
16	Tornillo M8*40 GB70.1			2
17	Cubierta del espaciador del antebrazo derecha			1
18	Chasis inferior negro Noa			1

CHASIS INFERIOR NOA COMPACT

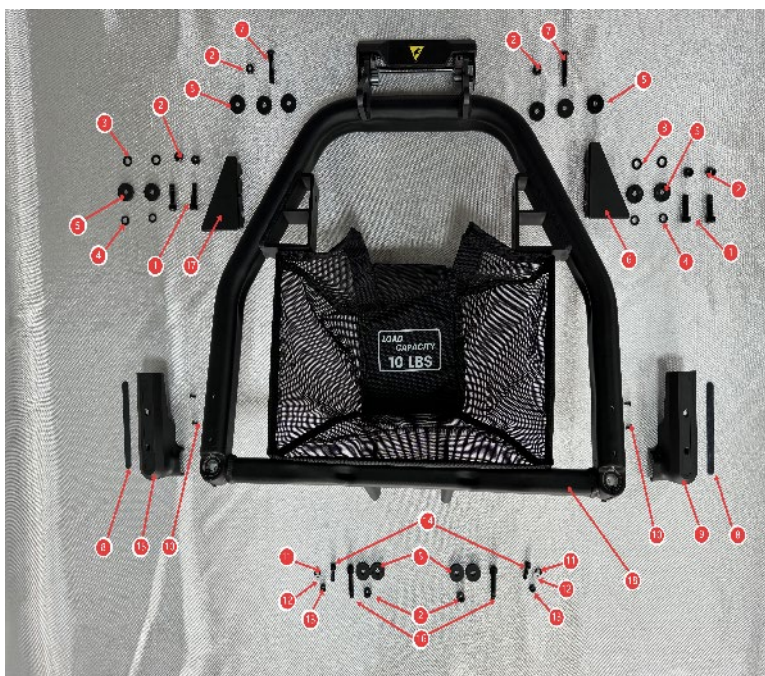


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M8*30 GB/T70.1	B-A002-00001	04062572	4
2	Tuerca M8 GB889			8
3	Arandela plana 8 GB97			4
4	Arandela Nylon $\phi 13.5 \times 8 \times 0.8$			8
5	Arandela Nylon 25T5			14
6	Funda de reposabrazos izquierda			1
7	Tornillo M8*40 10 GB/T70.2			2
8	Parche de cubierta de la articulación del antebrazo			2
9	Cubierta de la articulación del antebrazo izquierda			1
10	Tornillo M4*10 GB/T70.3			4
11	Arandela 6 GB93			2
12	Arandela Nylon blanca $\phi 13 \times 6.9 \times 1.1$			2
13	Tuerca M6 GB889			2
14	Tornillo M6*20 GB/T 70.1			2
15	Cubierta de la articulación del antebrazo Derecha			1
16	Tornillo M8*40 GB70.1			2
17	Cubierta del espaciador del antebrazo derecha			1
18	Chasis inferior negro Noa Compact			1

CHASIS PRINCIPAL NOA

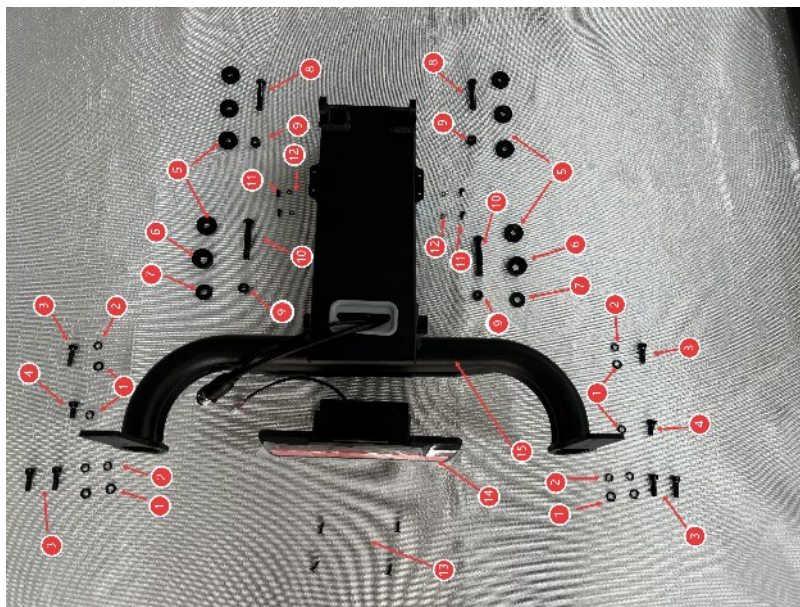


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela plana 6 GB 97	B-A001-00020	04062560	8
2	Arandela Grower 6 GB93			6
3	Tornillo M6x20 GB/T70.1			6
4	Tornillo M6x14 GB/T70.1			2
5	Arandela Nylon 25T5			6
6	Fundas deslizantes para abrazaderas de antebrazo.			2
7	Arandela Nylon 13.5x8x2			2
8	Tornillo M8*40 GB/T70.2			2
9	Tuerca M8 GB889			4
10	Tornillo M8*50 GB/T70.2			2
11	Tornillo M4*8 GB/T70.2			4
12	Arandela GB93 4			4
13	Tirafondo GB845 ST4.8x13			4
14	Piloto LED			1
15	Chasis principal Noa			1

CHASIS PRINCIPAL NOA COMPACT

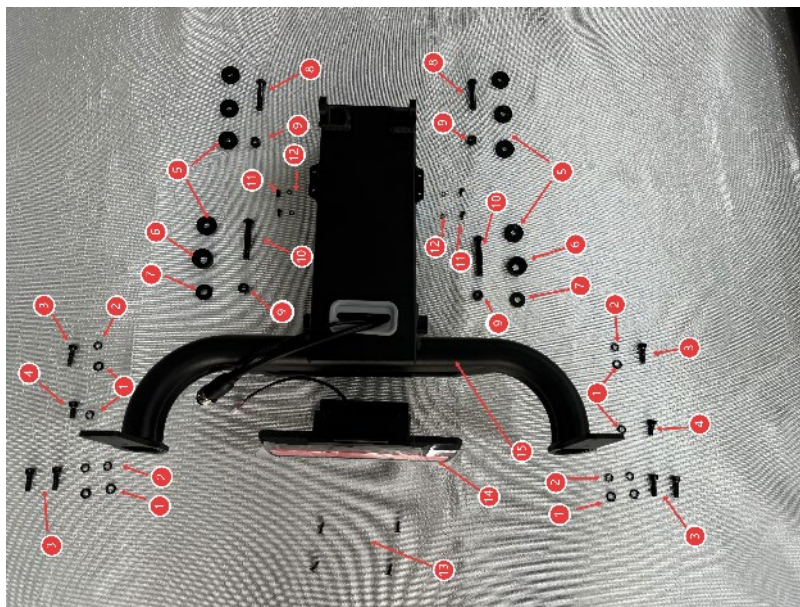


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela plana 6 GB 97	B-A002-00003	04062561	8
2	Arandela Grower 6 GB93			6
3	Tornillo M6x20 GB/T70.1			6
4	Tornillo M6x14 GB/T70.1			2
5	Arandela Nylon 25T5			6
6	Fundas deslizantes para abrazaderas de antebrazo.			2
7	Arandela Nylon 13.5x8x2			2
8	Tornillo M8*40 GB/T70.2			2
9	Tuerca M8 GB889			4
10	Tornillo M8*50 GB/T70.2			2
11	Tornillo M4*8 GB/T70.2			4
12	Arandela GB93 4			4
13	Tirafondo GB845 ST4.8x13			4
14	Piloto LED			1
15	Chasis principal Noa			1

CHASIS RESPALDO NOA / NOA COMPACT

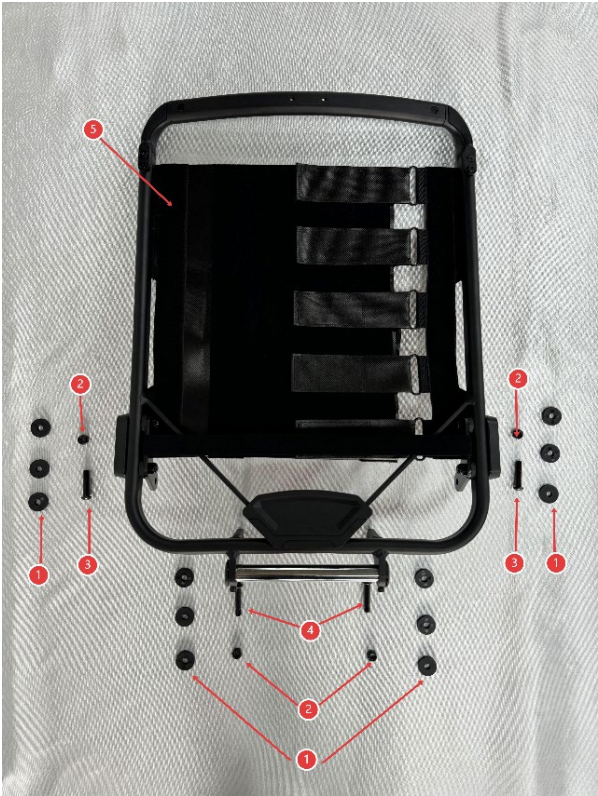


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela Nylon 25T5	B-A001-00019	04062537	12
2	Tuerca M8 GB889			4
3	Tornillo M8x35 10 GB/T70.2			2
4	Tornillo M8x40 10 GB/T70.2			2
5	Conjunto respaldo Noa			1
1	Arandela Nylon 25T5	B-A002-00005	04062538	12
2	Tuerca M8 GB889			4
3	Tornillo M8x35 10 GB/T70.2			2
4	Tornillo M8x40 10 GB/T70.2			2
5	Conjunto respaldo Noa Compact			1

TAPIZADO RESPALDO NOA / NOA COMPACT

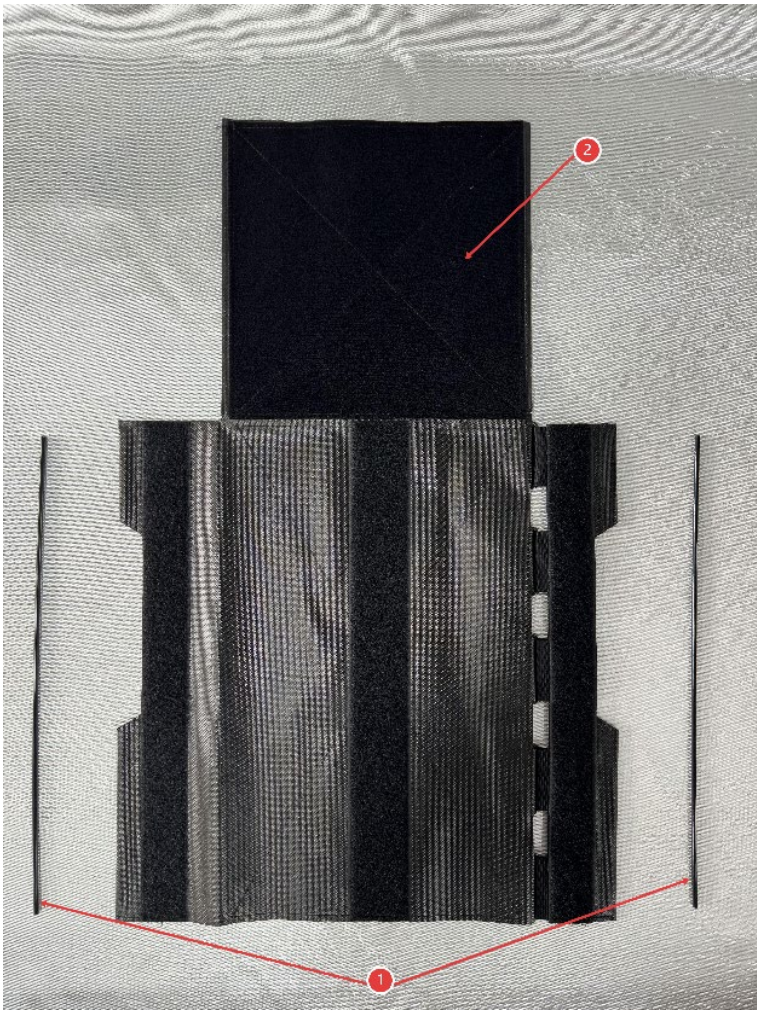


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tapizado respaldo Noa	B-A001-0005		1
	Soportes tapizado respaldo Noa			
1	Tapizado respaldo Noa Compact	B-A001-0005		1
	Soportes tapizado respaldo Noa Compact			

COJÍN RESPALDO NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Cojín respaldo NOA	B-A001-00004	04062539	1
1	Cojín respaldo NOA COMPACT	B-A002-00009	04062540	1

CHASIS ASIENTO NOA / NOA COMPACT

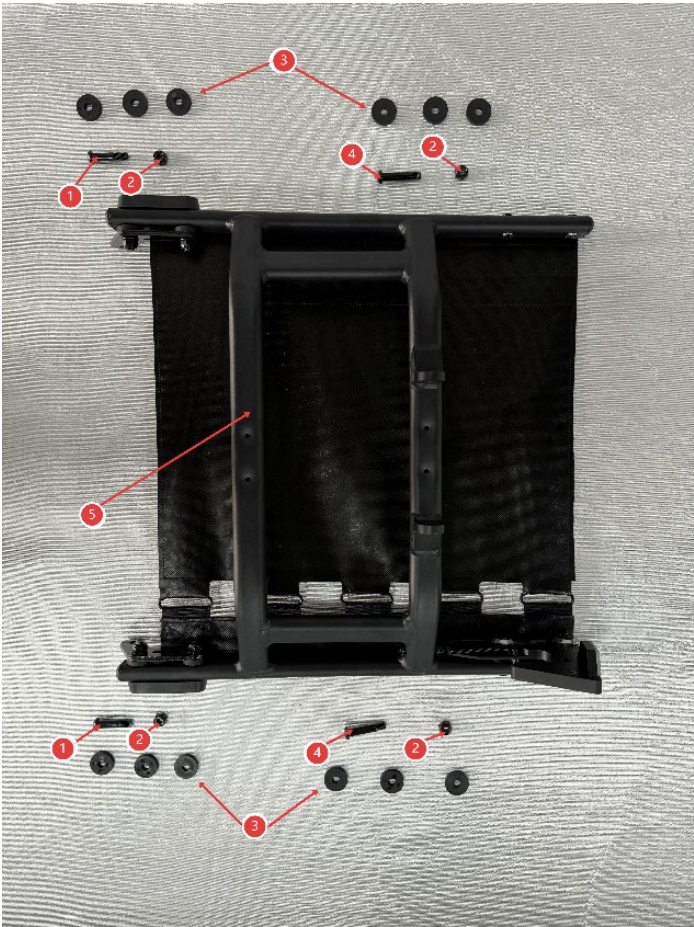


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M8x35 10 GB/T70.2	B-A001-00028	04062548	2
2	Tuerca M8 GB889			4
3	Arandela Nylon 25T5			12
4	Tornillo M8*40 GB/T70.2			2
5	Chasis asiento Noa			1
1	Tornillo M8x35 10 GB/T70.2	B-A002-00004	04062549	2
2	Tuerca M8 GB889			4
3	Arandela Nylon 25T5			12
4	Tornillo M8*40 GB/T70.2			2
5	Chasis asiento Noa Compact			1

BASE COJÍN ASIENTO NOA / COMPACT

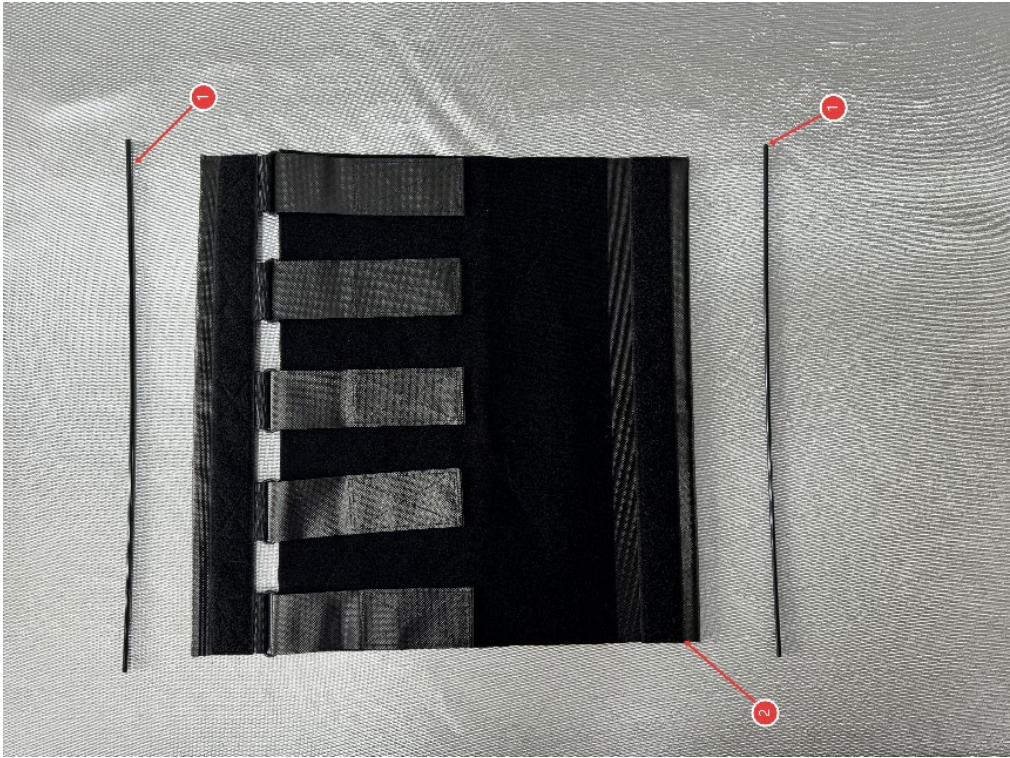


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Fijaciones base asiento	B-A001-00026		2
2	Base cojín asiento			1

COJÍN ASIENTO NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Cojín asiento Noa	B-A001-00027	04062545	1
1	Cojín asiento Noa Compact	B-A002-00010	04062546	1

PLATAFORMA REPOSAPIÉS NOA / COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela Nylon 25T5	B-A001-00013	04062558	1
2	Tuerca M8			
3	Tornillo M8x40			
4	Plataforma reposapiés Noa			
1	Arandela Nylon 25T5	B-A001-00007	04062559	
2	Tuerca M8			
3	Tornillo M8x40			
4	Plataforma reposapiés Noa Compact			

FIJACIONES PLATAFORMA NOA / COMPACT

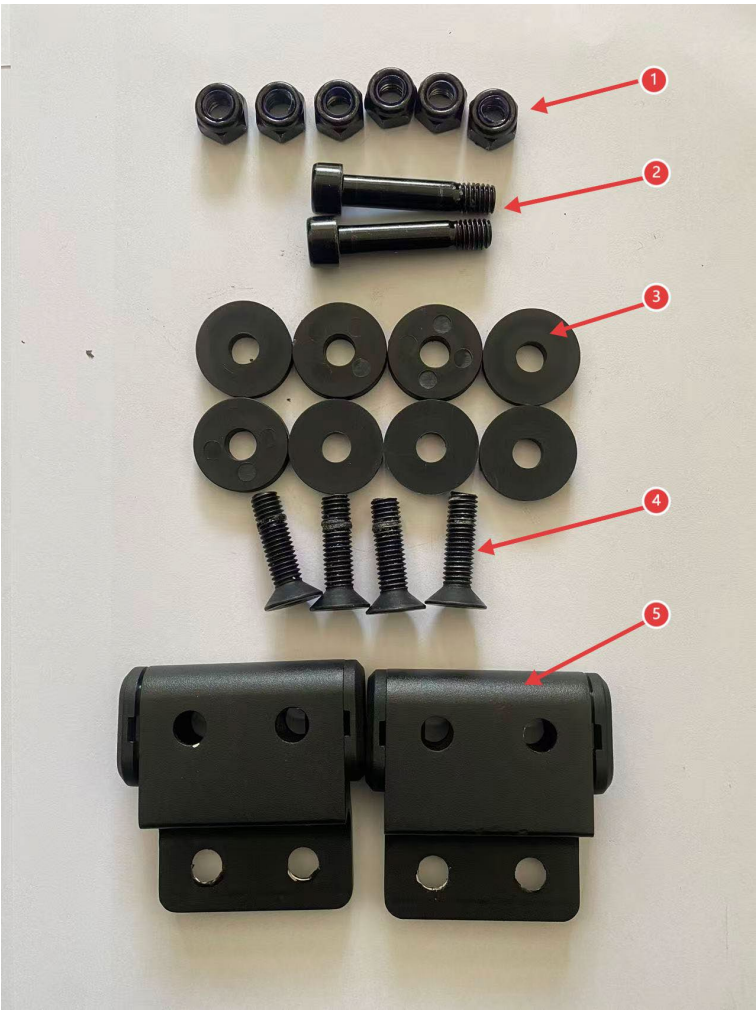


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tuerca M8 GB889	B-A002-00008	04062582	6
2	Tornillo M8*40 GB70.1			2
3	Arandela nylon 25T5			6
4	Tornillo M8*35 GB70.3			4
5	Fijaciones plataforma Noa			2
6	M8 GB889			6

TUBO SUPERIOR RESPALDO NOA / COMPACT

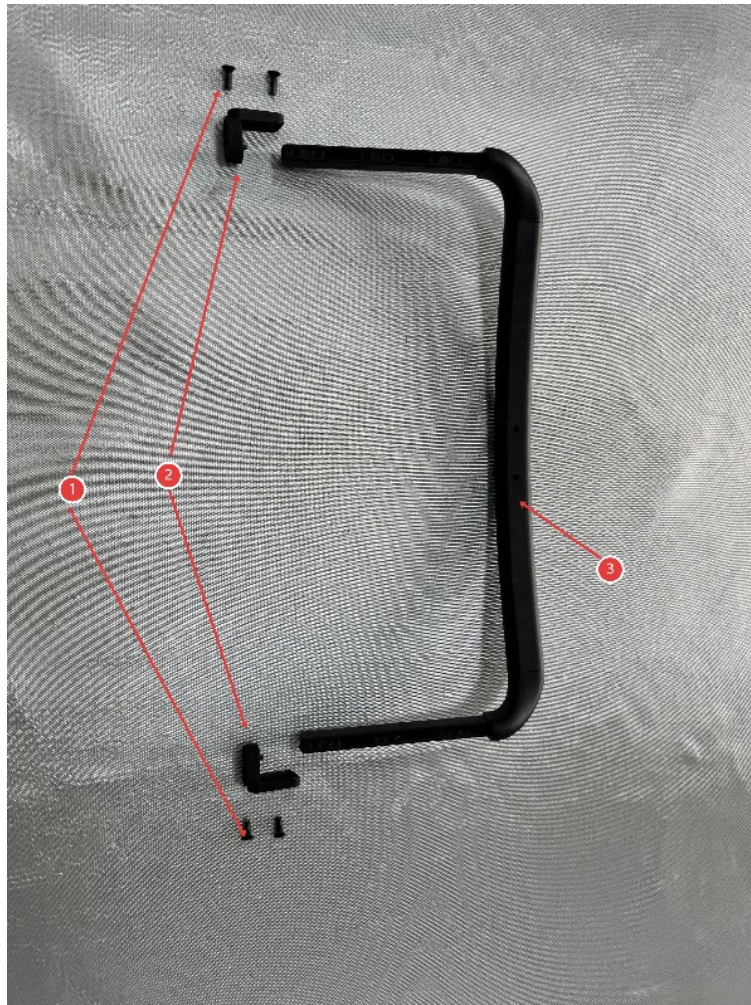


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M5*14 GB/T70.3	B-A001-00031	04062535	4
2	Tapa respaldo			2
3	Tubo superior respaldo Noa			1
1	Tornillo M5*14 GB/T70.3	B-A002-00006	04062536	12
2	Tapa respaldo			4
3	Tubo superior respaldo Noa Compact			2

HORQUILLA NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M12	B-A001-00014	04062551	1
2	Horquilla			
3	Tornillo hembra $\phi 8 \times 70$ (Interior M6)			
4	Tornillo M6x12			

MOTOR IZQUIERDO NOA / NOA COMPACT

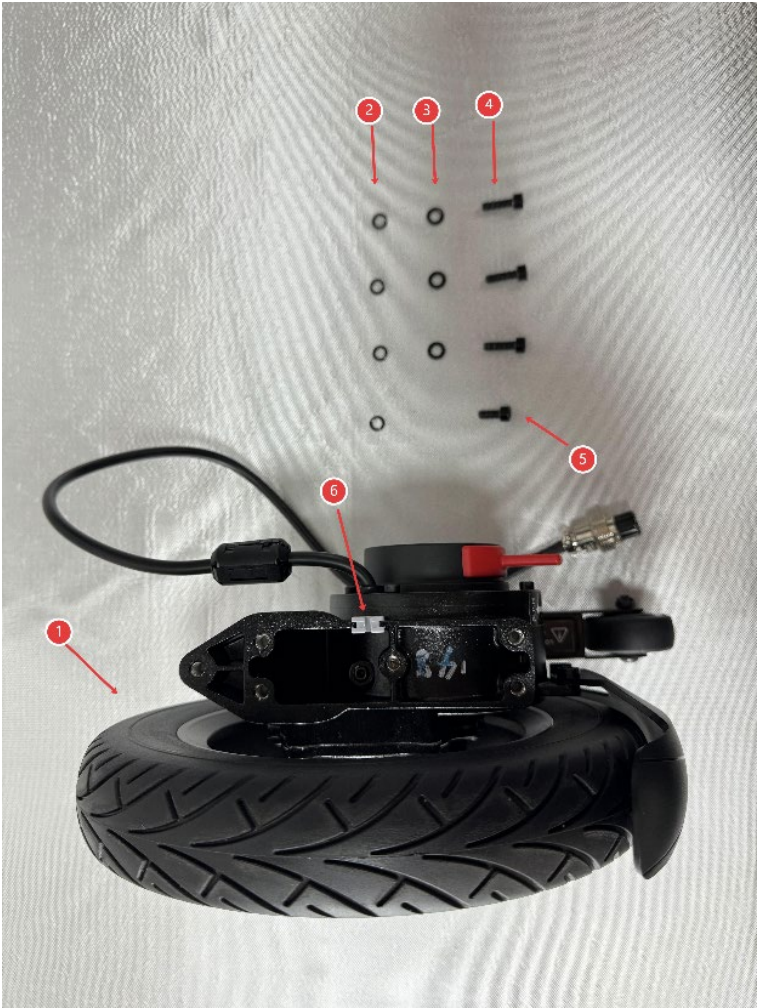


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Conjunto motor izquierdo	B-A001-00021	04062562	1
2	Arandela plana M6 GB 97			4
3	Arandela Grower GB93			3
4	Tornillo M6x20 GB/T70.1			3
5	Tornillo M6x14 GB/T70.1			1
6	Cubierta protectora del cable del motor.			1

MOTOR DERECHO NOA / NOA COMPACT

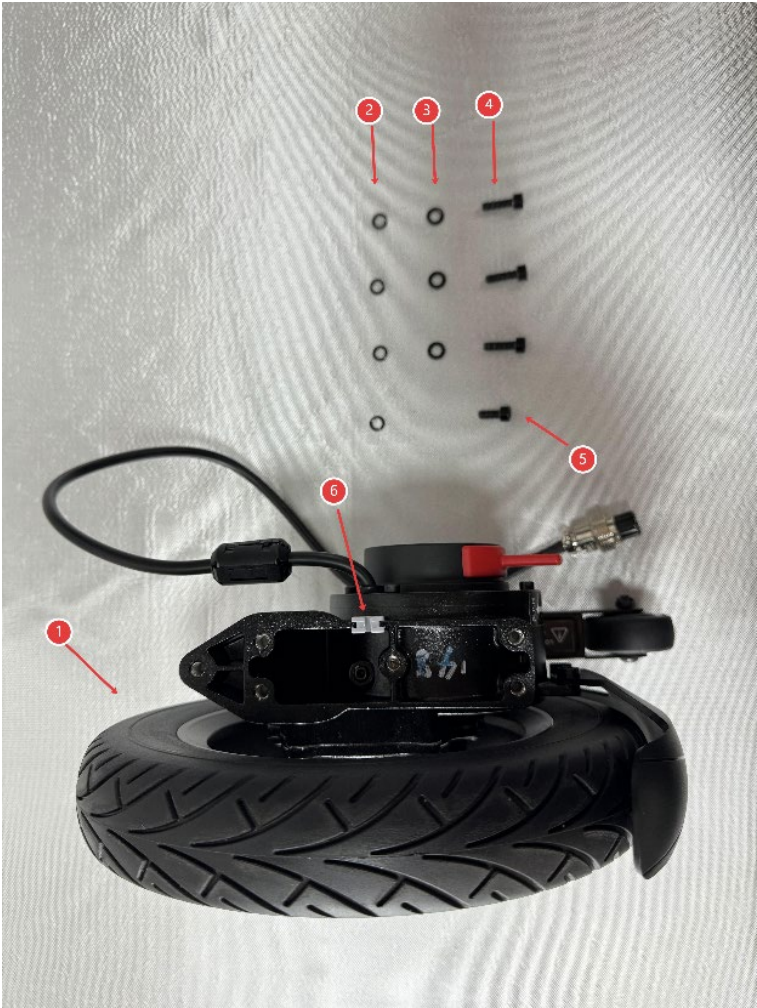


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Conjunto motor derecho	B-A001-00022	04062553	1
2	Arandela plana M6 GB 97			4
3	Arandela Grower GB93			3
4	Tornillo M6x20 GB/T70.1			3
5	Tornillo M6x14 GB/T70.1			1
6	Cubierta protectora del cable del motor.			1

REPOSABRAZOS IZQUIERDO NOA / NOA COMPACT

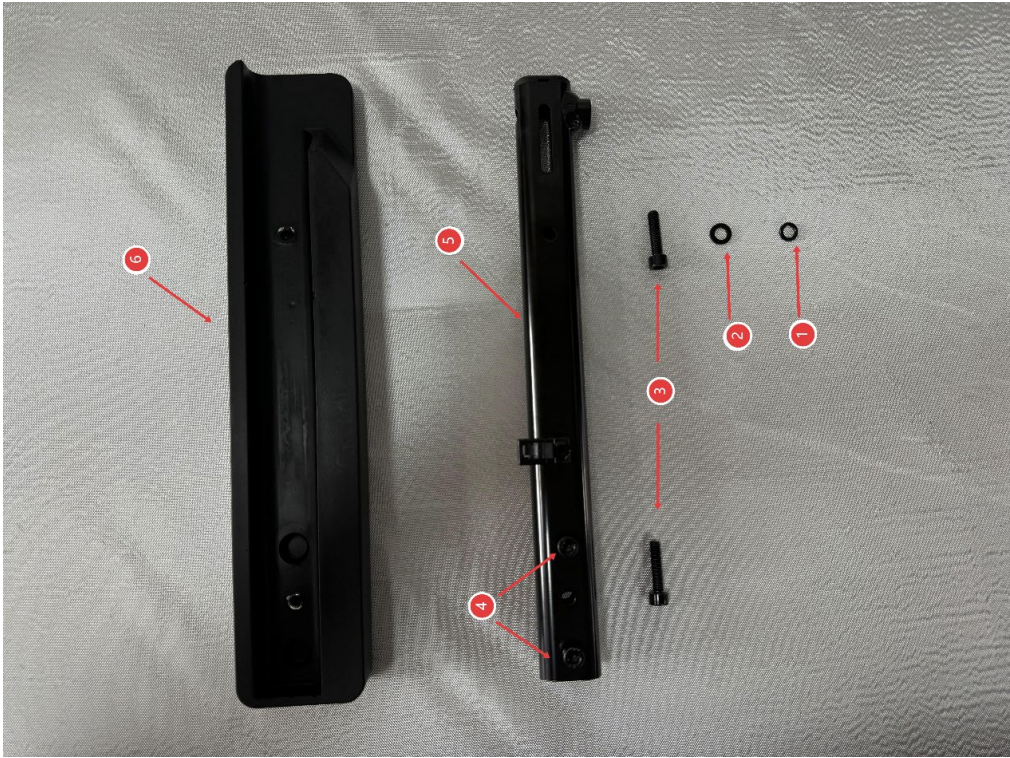


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela M6	B-A001-00002	04062543	1
2	Arandela Grover M6			
3	Tornillo M6x25			
4	Tornillo M6x25			
5	Tubo reposabrazos			
6	Espuma reposabrazos izq.			

REPOSABRAZOS DERECHO NOA / NOA COMPACT

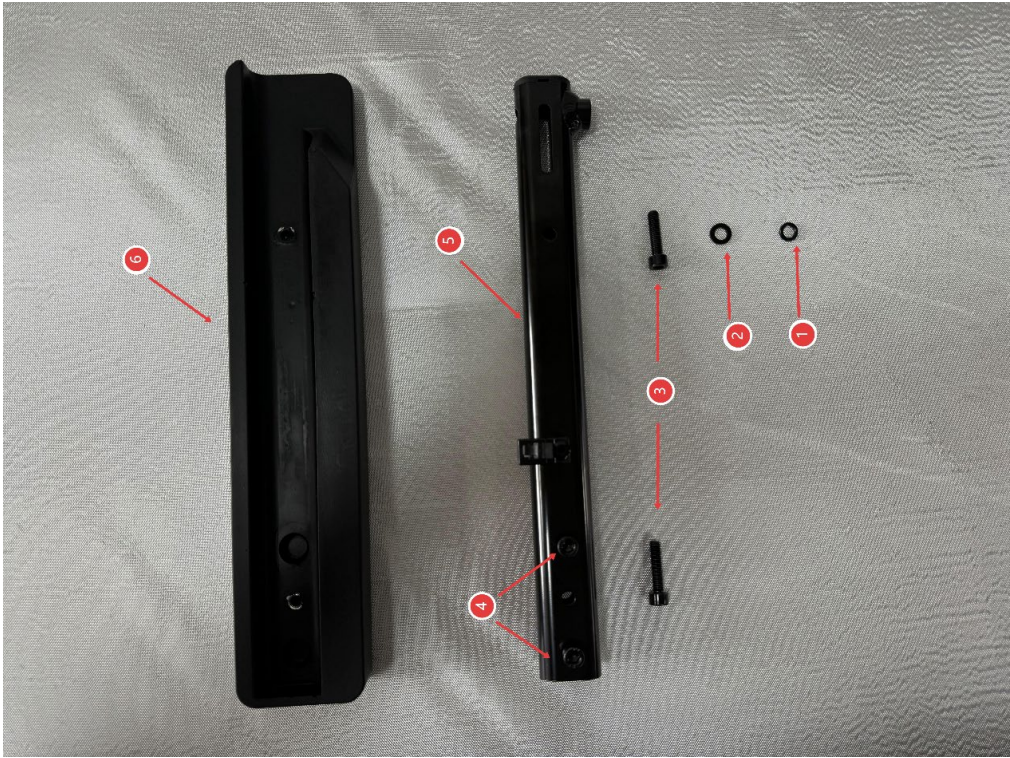


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela M6	B-A001-00003	04062534	1
2	Arandela Grover M6			
3	Tornillo M6x25			
4	Tornillo M6x25			
5	Tubo reposabrazos			
6	Espuma reposabrazos drch.			

ANTI VUELCOS NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tuerca M6	B-A001-00001	04062542	1
2	Tornillo M6×35 GB/T 70.2			
3	Muelle torsión antivuelco R			
4	Muelle torsión antivuelco L			
5	Rueda antivuelco R			
6	Rueda antivuelco L			

CARGADOR NOA / NOA COMPAC



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Cargador 2A	B-A001-00006	04061248	1

BATERÍA NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Batería Li-on 12AH	B-A001-00007	04061245	1

CENTRALITA NOA / NOA COMPACT

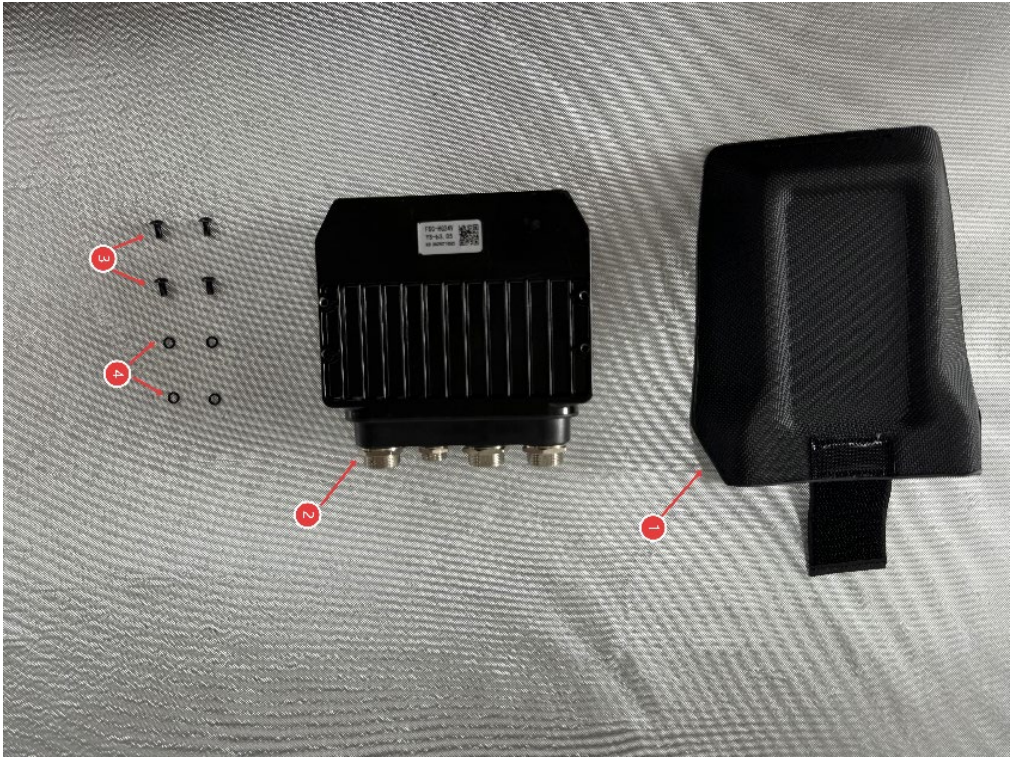


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Funda Centralita	B-A001-00010	04062552	1
2	Centralita	B-A001-00042	04062566	1
3	Tornillo M4*8 GB/T70.2			4
4	Arandelas M4			4

CABLE JOYSTICK NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Cable Joystick NOAs	B-A001-00009	04062544	1

SOPORTE JOYSTICK NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Soporte Joystick NOA	B-A001-00016	04062571	1
2	Tornillo M5x10			

JOYSTICK NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Joystick NOA	B-A001-00015	04062541	1
2	Tornillo M5x10			

PILOTO NOA / NOA COMPACT

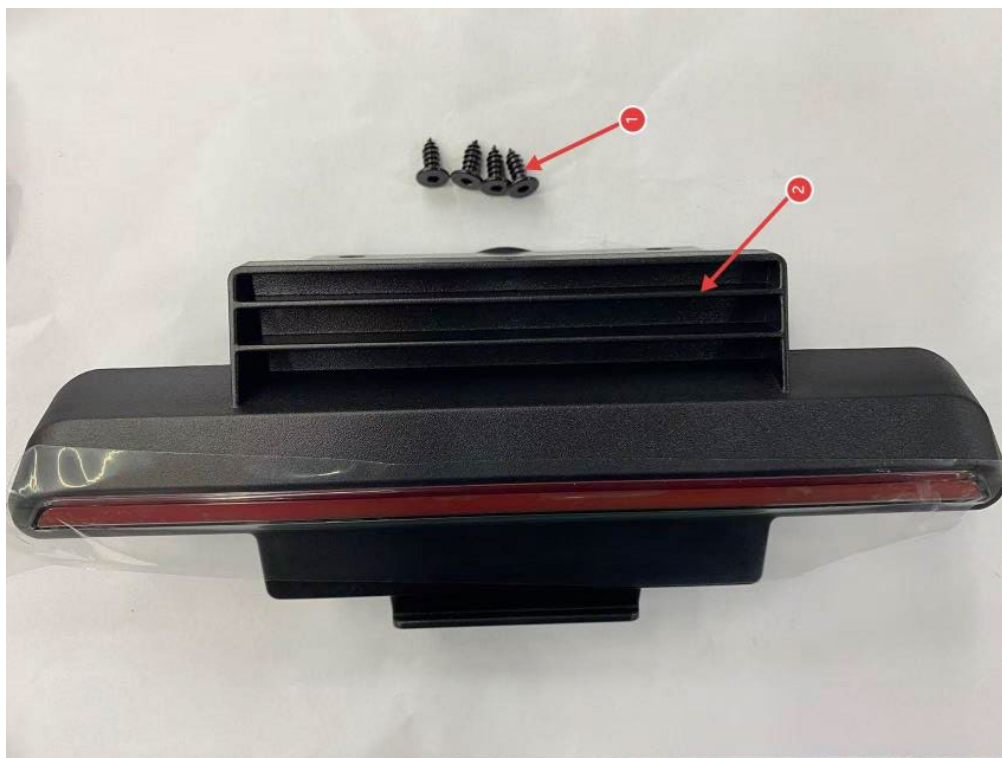


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tirafondo ST4.8x13	B-A001-00017	04062569	1
2	Piloto luz trasera			

RUEDAS MALETERO NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M6*20 GB/T 70.1	B-A001-00018	04062565	2
2	Tuerca M6 GB889			2
3	Arandela Nylon blanca $\phi 13*6.9*1.1$			2
4	Arandela M6 GB93			2
5	Conjunto Ruedas deslizamiento maletero lzq.			1
6	Conjunto Ruedas deslizamiento maletero drch.			1

CABLE ALIMENTACIÓN NOA / NOA COMPACT

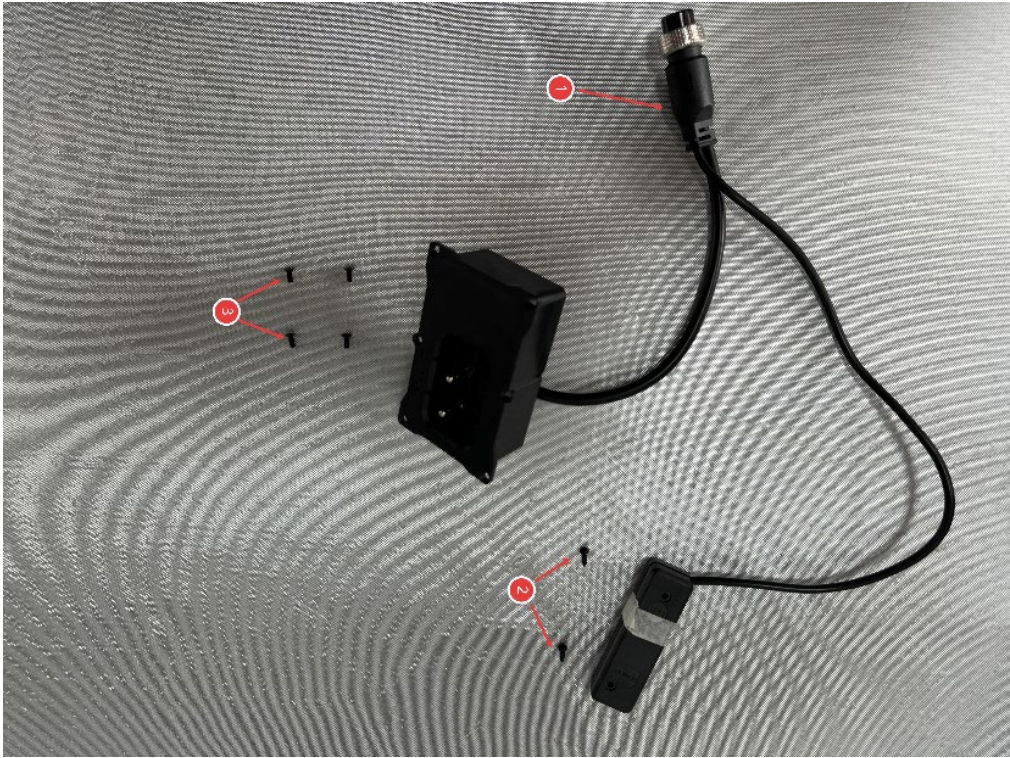


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Cable alimentación	B-A001-00023	04062563	1
2	Tirafondo ST2.9x9.5 GB845			2
3	Tornillo M3*8 GB/T70.3			4

PALANCA LIBERACIÓN NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Palanca liberación rápida NOAs	B-A001-00024	04062568	1

GATILLO BLOQUEO NOA / NOA COMPACT

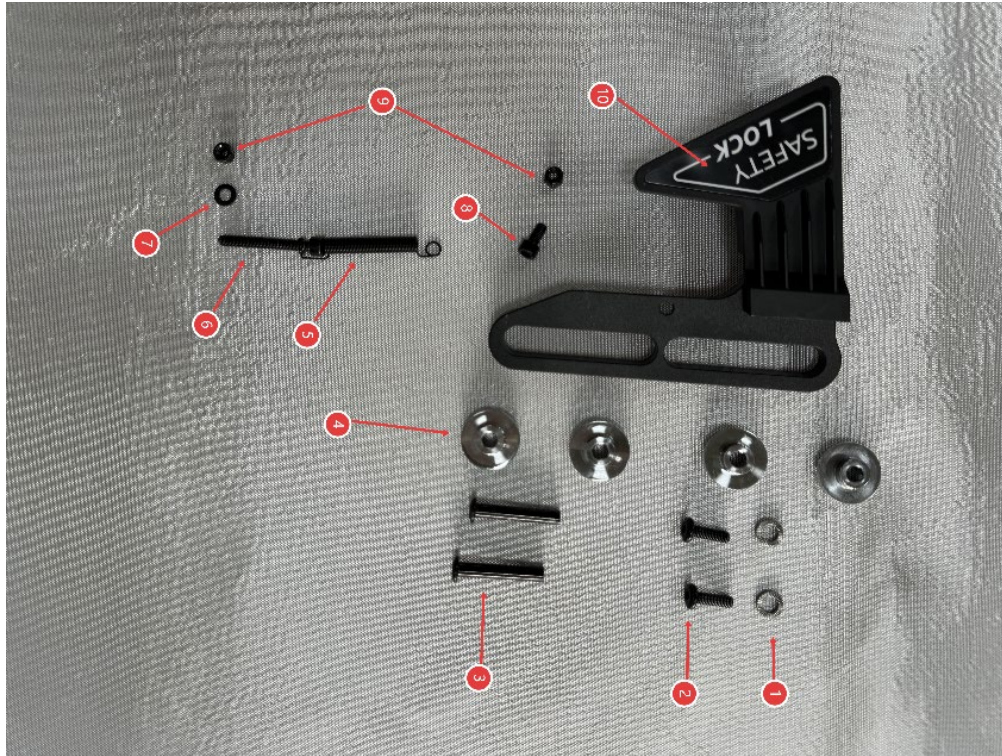


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Arandela autoblocante de doble capa M6	B-A001-00025	04062556	2
2	Tornillo M6*8			2
3	Tornillo hembra $\phi 8 \times 35$ (Interior M6)			2
4	Casquillos de bloqueo			4
5	Muelle			1
6	Tornillo M5*40 GB/T70.1			1
7	Arandela plana M5			1
8	Tornillo M5*10 GB/T70.1			1
9	Tuerca M8 GB889			2
10	Gatillo bloqueo			1

CESTA NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tirafondo ST4.8*16 GB845	B-A001-00029	04062550	1
2	Virola			2
3	Cesta Noa			4

TAPA DESBLOQUEO NOA / NOA COMPACT

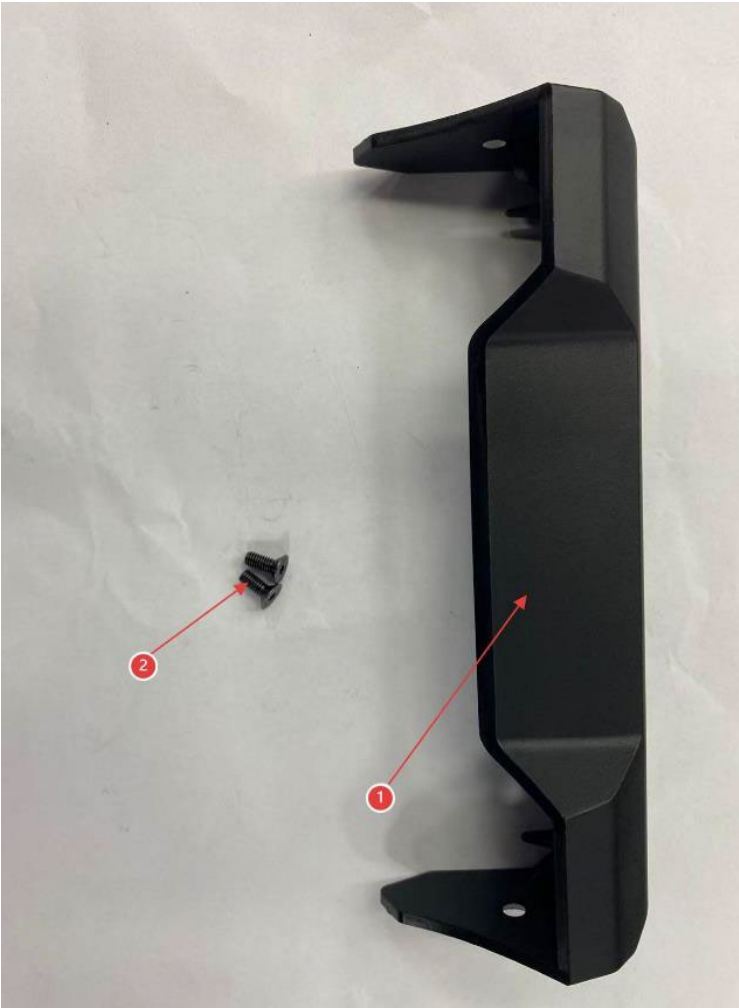


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tapa de desbloqueo	B-A001-00030	04062584	1
1	Tornillo M5*18 GB/T70.3			1

RUEDA DELANTERA NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo hembra $\phi 8 \times 70$ (Interior M6)	B-A001-00032	04062557	1
2	Tornillo M6x12			1
3	Rueda delantera			1

RUEDA DELANTERA NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Rueda trasera 10"	B-A001-00033	04062570	1
2	Tornillo M6x12			3
3	Pegatina Wellell			1

TAPAS & TAPONES NOA / NOA COMPACT

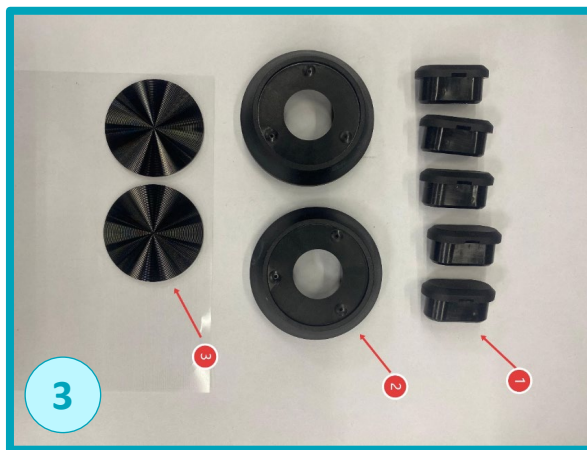


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Pomo Joystick Noa	B-A001-00034	04062581	1
2	Tornillo bloqueo	B-A001-00036	04061232	2
3	Set tapas y tapones	B-A001-00035	04062567	1
4	Set tornillos	B-A001-00037		1

ARTICULACIÓN REPOSABRAZOS NOA / NOA COMPACT

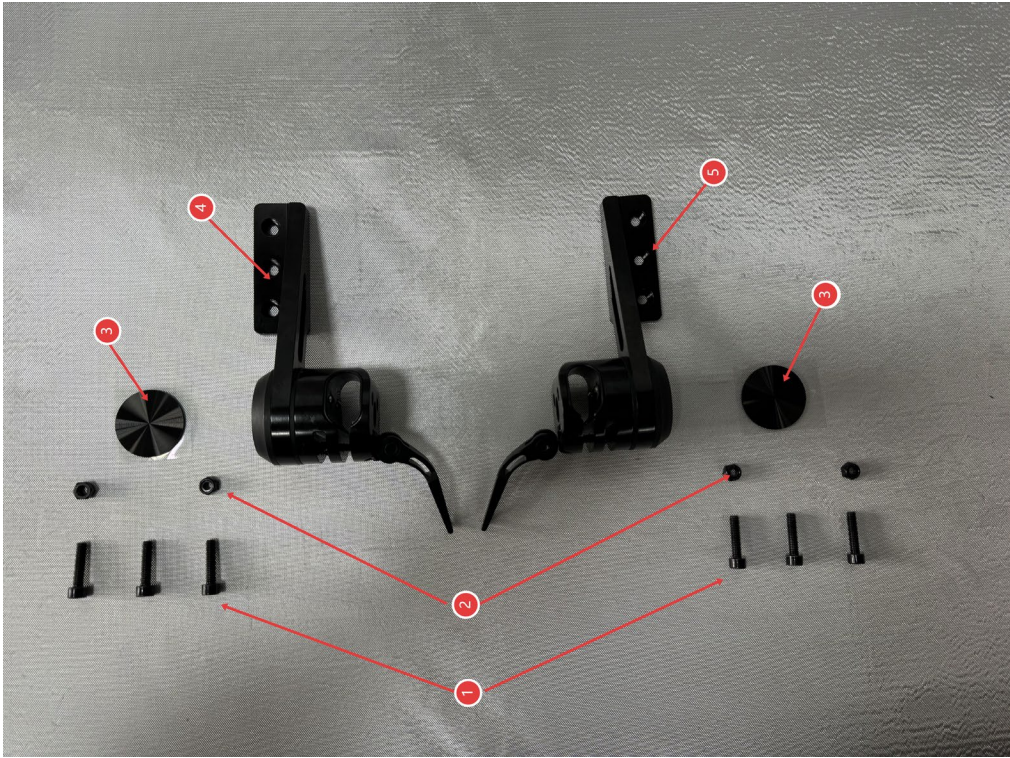


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Tornillo M6*25 GB/T70.1	B-A001-00038	04062583	6
2	Tuerca M6			2
3	Tapa embellecedora			2
4	Articulación de reposabrazos derecha			1
5	Articulación de reposabrazos izquierda			1

RUEDA ANTIVUELCO NOA / NOA COMPACT

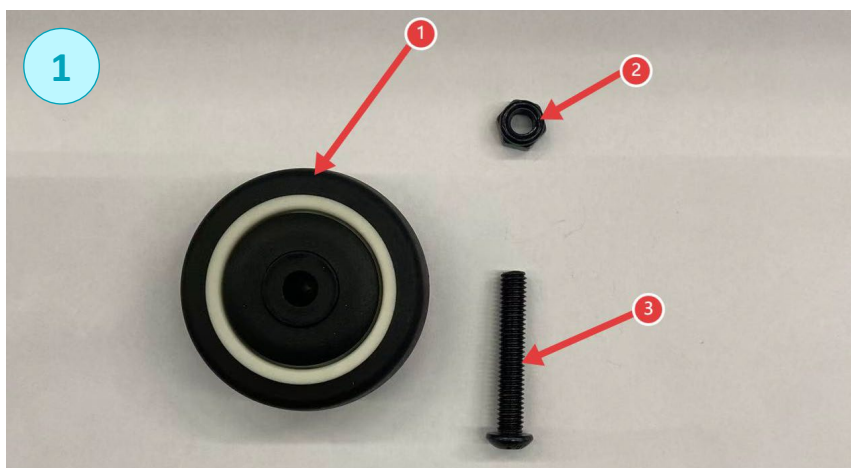


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Set rueda antivuelco	B-A001-00039	04062555	1
2	Pegatina rueda Wellell	B-A001-00040	04062573	1

GUARDABARROS NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Guardabarros	B-A001-00041	04062554	1
1	Tornillo M8*8 GB/T70.1	B-A002-00010	04062546	2

ESPUMA REPOSABRAZOS IZQ. NOA / NOA COMPACT



FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Espuma reposabrazos izquierdo	B-A001-00043		1
2	Tornillo M6*25 GB/T 70.1			2
3	Arandela plana M6			1
4	Arandela Grower M6			1

ESPUMA REPOSABRAZOS DRCH. NOA / NOA COMPACT

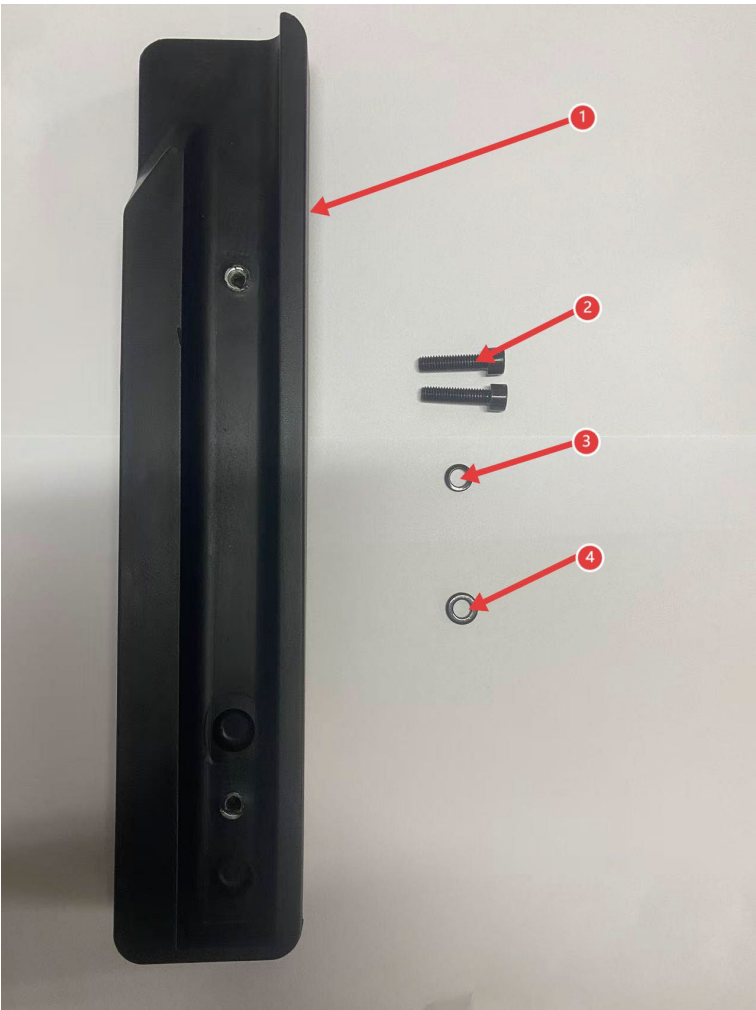


FIGURA	DESCRIPCIÓN	ORACLE	REFERENCIA	CANTIDAD
1	Espuma reposabrazos derecho	B-A001-00044		1
2	Tornillo M6*25 GB/T 70.1			2
3	Arandela plana M6			1
4	Arandela Grower M6			1

Wellell

Wellell

Explorer Noa (9001)

ELCANO 9 6ª PLANTA

48.008 BILBAO (SPAIN)

TEL. +34 944 706 408 – FAX. +34 944 706 409

WEB. <https://www.wellell.com/es>